

GRAF *Baby-Sono-Fix*



Präzision und Sicherheit



Sonofix Lagerungsschale zur Hüftsonographie

CE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Sono-Fix gewährleistet eine exakte Hüftultraschalluntersuchung von Babys bis zum Alter von einem Jahr. Durch eine exakte Fixierung der Säuglinge in der Seitenlage können präzise Ultraschallbilder erzielt werden.

Es handelt sich um ein Medizinprodukt der Kategorie I im Sinne der europäischen Richtlinie 93/42/EG in der geltenden Fassung.

Die Lagerungsschale aus hochwertigen Materialien ermöglicht eine rasche und schonende Untersuchung ohne Fremdhilfe.

Aufstellung:



GEFAHR

Das Sono-Fix darf nur auf ebenen, horizontalen und trockenen (nicht rutschenden) Flächen aufgestellt werden!

Das Sono-Fix darf nur mit einer ordnungsgemäß auf der Grundplatte fixierten Trägerschale (Bild 6: richtig eingeführten Fixierlasche) verwendet werden.

Alle Materialien sind waschbar (siehe Kap. Reinigung Seite 3). Aus Hygienegründen sollte das Sono-Fix nur mit einem geeignetem Abdecktuch/Windel (gegebenenfalls steril) verwendet werden. Die eingesetzten Materialien bzw. deren Oberflächen sind NICHT STERIL.

Bitte beachten Sie auch das Materialdatenblatt des verwendeten Schaumstoffes (Seite 5).

Abdecktuch



Abdecktuch




GEFAHR


Niemals das Baby unbeaufsichtigt in dem Sono-Fix liegen lassen!

Aufbau

Das Sono-Fix besteht aus:

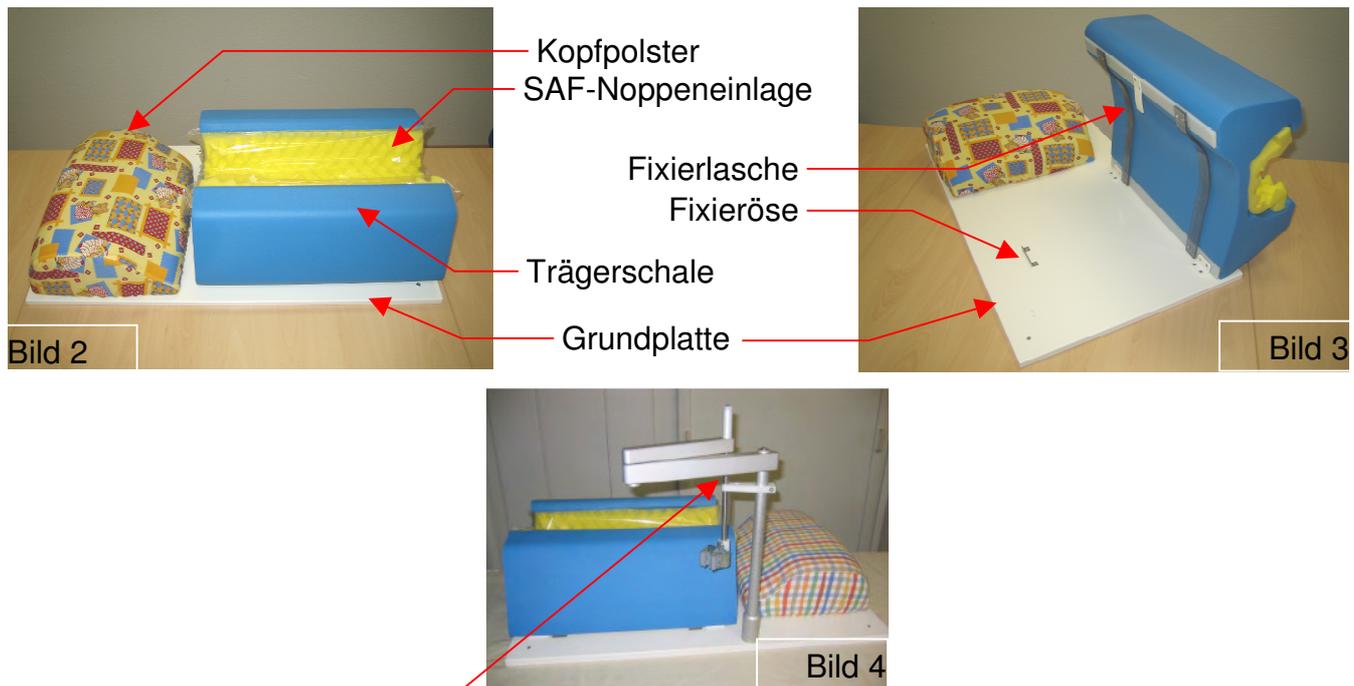

Optional kann ein Sonoguide zur verbesserten Schallkopfführung eingesetzt werden.

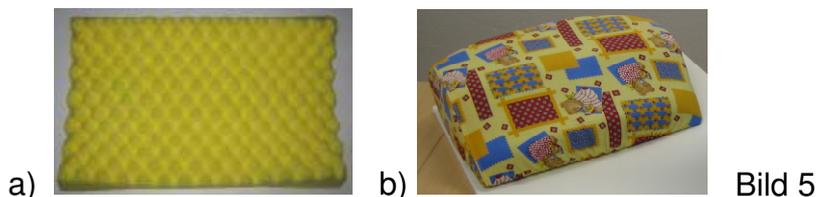

SAF-Noppeneinlage (viskoelastisches Material) und Kopfteilbezüge sind auch einzeln lieferbar

Reinigung

Schaumstoffteile und Grundplatte:

Zur Reinigung kann die Trägerschale (Bild 1) hochgeklappt werden (Bild 2). Dazu zieht man die Fixierlasche aus der Fixieröse (Bild 6).

Die Reinigung erfolgt mittels Desinfektionsmittel (Formalinlösung, Feinwaschmittel etc.) mit einer Temperatur von max. 50 °C



Kopfpolsterbezug

Der Kopfpolsterbezug ist einfach vom Kopfpolster zu lösen. Er ist vorgewaschen und kann mit Feinwaschmittel bei 30 °C gewaschen werden.

Lagerung

Das Graf Baby-Sono-Fix ist im Trockenen unter Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung zu lagern

Kennzeichnung

Das Sono-Fix ist auf der Rückseite der Trägerplatte mit folgenden Hinweisen gekennzeichnet:

Seriennummer:

XXXXXXXXXX

Produktionsdatum:

TTMMJJ

GRAF - *Baby-Sono-Fix*



Medizinprodukt der Kat. I
NICHT STERIL

Tapezierer- & Decorateur- Meisterbetrieb

Gebr. HIRSCHBECK GmbH

8843 St. Peter am Kammersberg 161
AUSTRIA

Tel.: +43 664 5238930

Fax.: +43 3536 8235 14

e-mail: info@hirschbeck.eu

www.hirschbeck.eu

Made in Austria