

SONOGUIDE



Sonoguide


Schallkopfführung zur Hüftsonographie

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sonoguide dient zur Aufnahme eines Ultraschallkopfes zur präzisen Hüftsonographie an Babys in Verbindung mit einem Graf **Baby-Sono-Fix**.

Es handelt sich um ein Medizinprodukt der Kategorie I im Sinne der europäischen Richtlinie 93/42/EG in der geltenden Fassung.

Aufbau

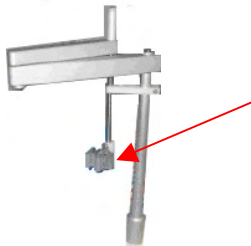

Beim Sonoguide handelt es sich um einen metallischen Schwenkarm mit einer Universalaufnahme für verschiedene Ultraschallköpfe.

Aufstellung/Montage:



GEFAHR

Der Sonoguide darf nur an der Grundplatte des Graf *Baby-Sono-Fix* mit den mitgelieferten Schrauben montiert werden.

Der Sonoguide darf nur nach einer ordnungsgemäßen Fixierung auf der Grundplatte verwendet werden.

Der feste Sitz ist wöchentlich zu kontrollieren!

Setzen Sie den Sonoguide auf die dafür vorgesehenen Bohrungen (Bild 1) und fixieren Sie ihn von der Rückseite mit den 3 mitgelieferten Schrauben. Ziehen Sie diese fest an!

Grundplatte mit Montagebohrungen

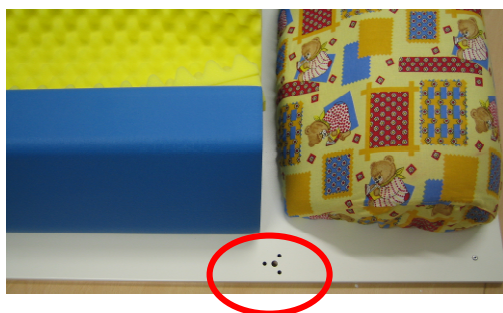


Bild 1

Fertig montierter Sonoguide



Bild 2

Danach setzen Sie den Schallkopf in die Universalhalterung ein.



Bild 3

Fertig aufgebauter, einsatzfähiger Sonoguide.



Bild 4

Besondere Hinweise



GEFAHR

Niemals das Baby unbeaufsichtigt lassen!

Reinigung

Die Reinigung erfolgt mittels Desinfektionsmittel (Formalinlösung, etc.) mit einer Temperatur von max. 50 °C.

Lagerung

Keine besonderen Vorkehrungen.

Kennzeichnung

Das Sonoguide ist mit folgenden Hinweisen gekennzeichnet:

Seriennummer:

XXXXXXXXXX

Produktionsdatum:

TTMMJJ

Sonoguide



Medizinprodukt der Kat. I
NICHT STERIL

Tapezierer- & Decorateur- Meisterbetrieb

Gebr. HIRSCHBECK GmbH

8843 St. Peter am Kammersberg 161
AUSTRIA

Tel.: +43 664 5238930

Fax.: +43 3536 8235 14

e-mail: info@hirschbeck.eu

www.hirschbeck.eu

Made in Austria